

**Ei enää huolta kaviteetin syvyydestä**

**bulKEZ™**

KAKSOISKOVETTEINEN BULK FILL -YHDISTELMÄMUOVI

**Täytä kokonaan ja anna  
kovettua itsestään  
kemiallisesti**



**Rajoittamaton  
kovettumissyvyys**



**Loistava  
kiillotettavuus**



**Suunnattu  
kovettumis-  
kutistuma**



**Yhteensopiva  
kaikkien  
sidosaineiden  
kanssa**



**Danville**



## Ominaisuudet ja edut:

- kaviteetin täyttö yhdessä erässä – kerrostamista ei tarvita – rajoittamaton kovettumissyvyys
- rajoittamaton kovettumissyvyys varmistaa täydellisen kovettumisen syvissäkin kaviteeteissa
- ei erillistä pintamateriaalia
- parhaat interproksimaaliset ienrajan saumat ja vähiten saumakariesta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin
- yhteensopiva kaikkien metakrylaattipohjaisten sidosaineitten kanssa
- ei sonic-laitteiden käyttötarvetta kaviteettiin viennissä
- hyvä röntgenkontrasti
- nopea kovettuminen

Test Method	Bulk EZ™
Film Thickness	14 microns
Work/Set time (22°C/72°F)	90/120 s
Work/Set time (37°C/99°F)	40/65 s
Volume Shrinkage	3,80 %
Flexural Strength	138 MPa
Compressive Strength	261 MPa
Diametral Strength	50 MPa
Water Sorption	12 µg/mm
Water Solubility	0,0 µg/mm <sup>3</sup>
Radiopacity	320 % Al

### Tekniikka 1.



**1** Applikoi sidosaine (esim. Prelude One) käyttöohjeen mukaan



**2** Ilmakuivaa



**3** Valokoveta sidosaine käyttöohjeen mukaan




**1** Applikoi sidosaine (esim. Prelude One) käyttöohjeen mukaan



**2** Ilmakuivaa



**3** Valokoveta sidosaine käyttöohjeen mukaan

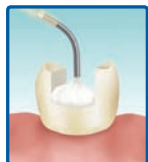

**4** Täytä kaviteetti Bulk EZ:llä




**5** ÄLÄ VALOKOVETA, anna asettua 90s



**6** Valokoveta 10s



**4** Täytä kaviteetti Bulk EZ:llä

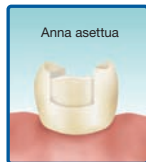

**5** ÄLÄ VALOKOVETA, anna asettua 90s



**6** Tee pintakerros yhdistelmämuovista



**7** Viimeistele



**7** Valokoveta käyttöohjeen mukaan



**8** Viimeistele

**Bulk EZ A2 2 x 6 g + 12 kpl**  
Til.nro 103002

**Bulk EZ A3 2 x 6 g + 12 kpl**  
Til.nro 103003

**Sekoitus- ja vientikärki**  
**17G 25 kpl**  
Til.nro 103010

**Sekoitus- ja vientikärki**  
**19G 25 kpl**  
Til.nro 103011

*"Danville on tehnyt sen jälleen....ratkaissut bulk-materiaalin salaisuudet ja tehnyt materiaalista luotettavamman ja ennen kaikkea palkitsevan."*  
Dr. Kami Kohani,  
Associate Professor, UCLA,  
School of Dentistry

*"Vihdoinkin bulk-materiaali, joka on parhaimmillaan ilman valokovetusta. Varmistaa hoitotuloksen hankalissa ja syvissä kaviteeteissa. Päivitetty versio perinteiseen "suunnatun supistumisen" tekniikkaan. Voidaan jättää myös puretaan ilman pintatäytettä. Kaksoiskovetteinen ja siksi monikäyttöinen. Erityisen hyvä proteettisissa korjauksissa."*

Hannu Laamanen, EHL, kliininen hammashoito, Turku  
Reality ET-Member

*"Erinomaisen monipuolinen bulk-tyyppinen yhdistelmämuovi. Lisäätkö pintamateriaalin vai et, voit valita vapaasti"*

-Dr. Troy Schmedding,  
Assistant Professor,  
UOP School of Dentistry

### Tilaukset:

Puh. 020 1772 300  
info@dentalsystems.fi  
www.dentalsystems.fi

Niittyänpolku 16  
00620 Helsinki  
Finland