


Ei enää huolta kaviteetin syvyydestä

bulKEZ™

KAKSOISKOVETTEINEN BULK FILL -YHDISTELMÄMUOVI

**Täytä kokonaan ja anna
kovettua itsestään
kemiallisesti**

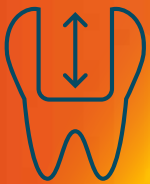

**Rajoittamaton
kovettumissyvyys**



**Loistava
kiillotettavuus**



**Suunnattu
kovettumis-
kutistuma**



**Yhteensopiva
kaikkien
sidosaineiden
kanssa**



Ominaisuudet ja edut:

- kaviteetin täyttö yhdessä erässä – kerrostamista ei tarvita – rajoittamaton kovettumissyvyys
- rajoittamaton kovettumissyvyys varmistaa täydellisen kovettumisen syvissäkin kaviteeteissa
- ei erillistä pintamateriaalia
- parhaat interproksimaaliset ienrajan saumat ja vähiten saumakariesta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin
- yhteensopiva kaikkien metakrylaattipohjaisten sidosaineitten kanssa
- ei sonic-laitteiden käyttötarvetta kaviteettiin viennissä
- hyvä röntgenkontrasti
- nopea kovettuminen

Test Method	Bulk EZ™
Film Thickness	14 microns
Work/Set time (22°C/72°F)	90/120s
Work/Set time (37°C/99°F)	40/65s
Volume Shrinkage	3.80%
Flexural Strength	138 MPa
Compressive Strength	261 MPa
Diametral Strength	50 MPa
Water Sorption	12 µg/mm
Water Solubility	0.0 µg/mm³
Radiopacity	320% AI

Tekniikka 1.



1 Applikoi sidosaine (esim. Prelude One) käyttöohjeen mukaan



2 Ilmakuivaa



3 Valokoveta sidosaine käyttöohjeen mukaan



1 Applikoi sidosaine (esim. Prelude One) käyttöohjeen mukaan



2 Ilmakuivaa



3 Valokoveta sidosaine käyttöohjeen mukaan



4 Täytä kaviteetti Bulk EZ:llä



5 ÄLÄ VALOKOVETA, anna asettua 90s



6 Valokoveta 10s



4 Täytä kaviteetti Bulk EZ:llä



5 ÄLÄ VALOKOVETA, anna asettua 90s



6 Tee pintakerros yhdistelmämuovista



7 Viimeistele



7 Valokoveta käyttöohjeen mukaan



8 Viimeistele

Bulk EZ A2 2x6g + 10 kpl
Til.nro 103002

Bulk EZ A3 2x6g + 10 kpl
Til.nro 103003

Sekoitus- ja vientikärki
17G 25 kpl
Til.nro 103010

Sekoitus- ja vientikärki
19G 25 kpl
Til.nro 103011

"Danville on tehnyt sen jälleen....ratkaissut bulk-materiaalin salaisuudet ja tehnyt materiaalista luotettavamman ja ennen kaikkea palkitsevan."
Dr. Kami Kohani,
Associate Professor, UCLA,
School of Dentistry

"Vihdoinkin bulk-materiaali, joka on parhaimmillaan ilman valokovetusta. Varmistaa hoitotuloksen hankalissa ja syvissä kaviteeteissa. Päivitetty versio perinteiseen "suunnatun supistumisen" tekniikkaan. Voidaan jättää myös puretaan ilman pintatäytettä. Kaksoiskovetteinen ja siksi monikäyttöinen. Erityisen hyvä proteettisissa korjauksissa."

Hannu Laamanen, EHL, kliininen hammashoito, Turku
Reality ET-Member

"Erinomaisen monipuolinen bulk-tyyppinen yhdistelmämuovi. Lisäätkö pintamateriaalin vai et, voit valita vapaasti"

-Dr. Troy Schmedding,
Assistant Professor,
UOP School of Dentistry

Tilaukset:

Puh. 020 1772 300
info@dentalsystems.fi
www.dentalsystems.fi

Niitylänpolku 16
00620 Helsinki
Finland